
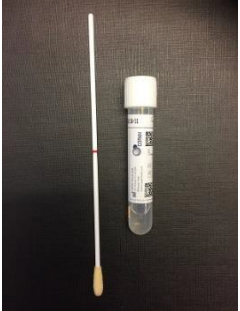




Mikrobiologiska laboratoriet
Länssjukhuset Ryhov

Nya provtagningspinnar för odling av bakterier och svampar

| | | |
|---|--|---|
| <p>Eswab standard, vit kork Provtagning för odling från:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sår, svalg, feces, vagina, cervix (även gonokocker) m m• MRB-screening• Jästsvamp <p>Lösningen i röret är helt ofarlig</p> |  |  |
| <p>Eswab nasopharynx, orange kork Provtagning för odling från</p> <ul style="list-style-type: none">• Nasopharynx• Uretra (även gonokocker)• Öra, öga• Små, mindre åtkomliga ytor <p>Lösningen i röret är helt ofarlig</p> |  |  |

Beställningsnummer hos Länsförsörjningen:

80061600 E-Swab provtagningspinne

80061700 E-Swab provtagningsset NPH

Instruktioner för flytande transportmedium, Eswab, se nedan


Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst


010-242 20 00

Mikrobiologiska laboratoriet
Länssjukhuset Ryhov


1. Öppna förpackningen och ta ut rör och flockad pinne. Endast den pinne som medföljer får användas.

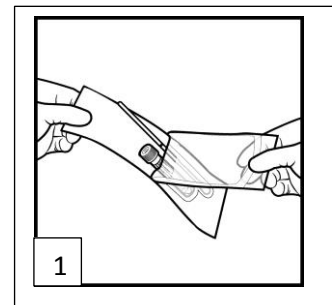


2. Ta provet enligt anvisningar i provtagningshandboken för respektive provlokal.

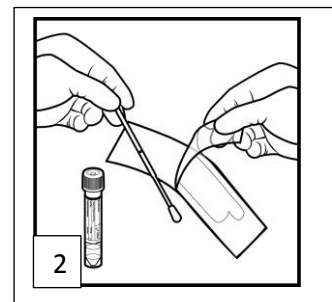


3. Skruva av korken på röret. Tänk på att hålla röret upprätt, så vätskan inte rinner ut. Sätt ner pinnen i röret så att den når botten. Nasopharynxpinnen måste tryckas ner till markeringen.

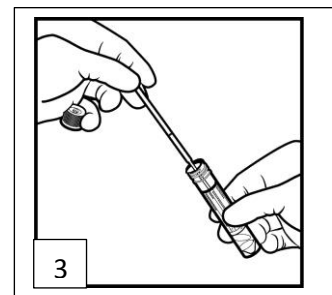

4. Överdelen av pinnen bryts av mot kanten av röret, vid markeringen, och kastas.

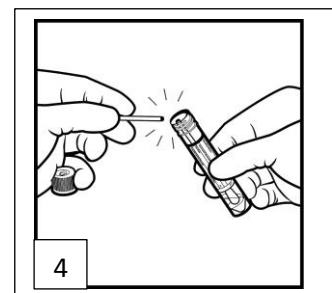

5. Skruva på locket ordentligt. Märk röret med etikett. Sätt etiketten så högt upp mot korken som möjligt.

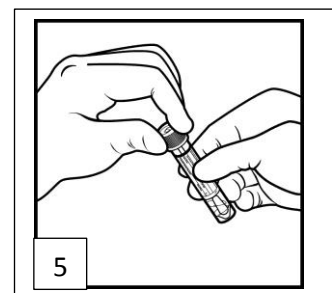

6. Förvara prov i kyla fram till transport.