

## Kateter attrapp, kvinna och man

Instruktion till momenten, kateterisering och tappning [Kvinna](#) respektive [Man](#) finns i Vårdhandboken


### **OBSERVERA!**

Bedövningsgel får **INTE** användas, då det förstör materialet i attrappen.


Vanliga foleykatetrar går inte att använda – för hög friktion mot materialet i attrappen.

Tappningskateter får endast i undantagsfall användas då dessa är behandlade med en gel som ogynnsamt påverkar materialet i attrappen.

### A. Stäng alla klämmor

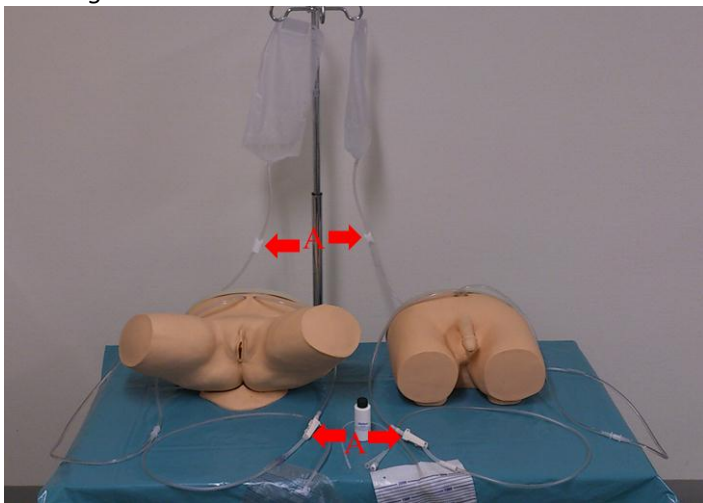


Fyll i vanligt kranvatten - 1 - och koppla ihop påse för vatten, "urin", med slang till attrapp -2 -  
Koppla sedan ihop kateter-, uppsamlingspåse, med slang från attrapp - 3 -

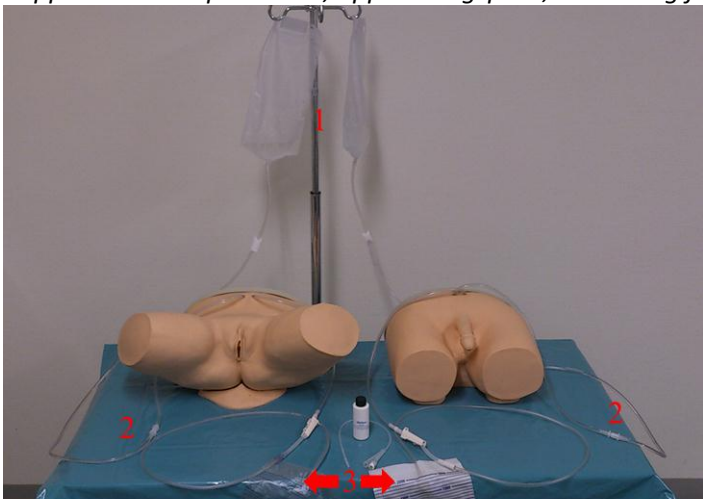

## Metodikum i Jönköpings län

*B. Siliconvätska används och simulerar "bedövningsgel", och gör momentet smidigare att utföra.  
B. Siliconkateter storlek 12 eller 14 kan användas.*

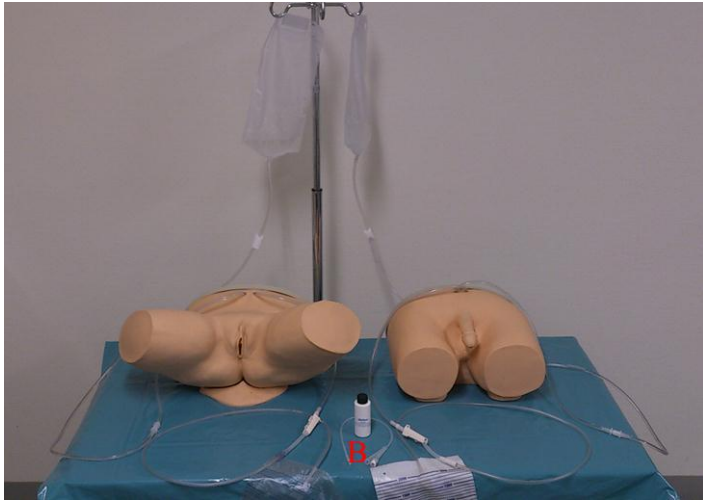

*Ovanstående korta beskrivning kompletterar bruksanvisning*