


## Stick arm, Adam & Rouilly (svår)

Instruktion till momenten, [venpunktion](#) och [PVK](#) finns i Vårdhandboken

Kontrollera att vätska, "blod" finns i flaskan på vänster sida -1 -

Pumpa upp ett LITET tryck - 2 -

Kontrollera att det blir ett LITET, SAKTA flöde i slangen till flaskan på höger sida - 3 -

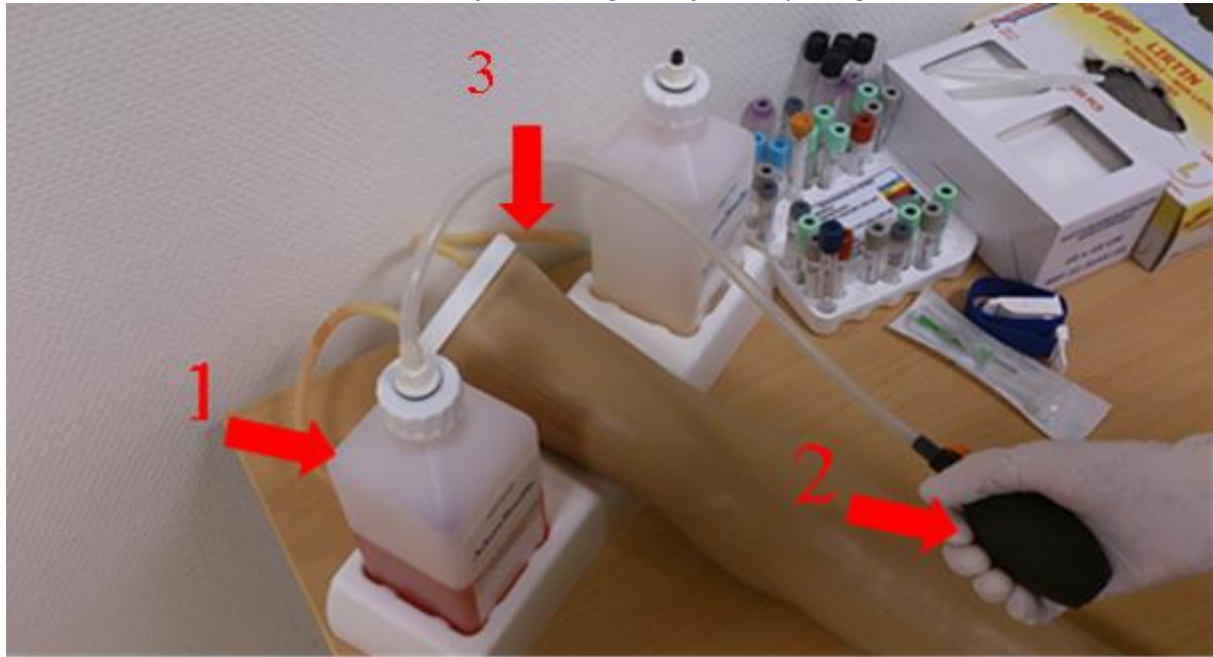

När/om vätskan, "blodet" tar slut i vänster flaska, skruva av locken och häll över. Börja om från - 1 -



**Observera.** I armen finns endast två "blodkärslangor" som är möjliga att sticka i. På stickarmen ser det ut som att det finns fler vilket kan göra det lite förvirrande. Blodkärlen/slangarna ligger i "spår" vilket kan kännas om man trycker lite extra.

Den här modellen är förhållandevis svår att träna på. Dels pga skinnets tjocklek men även pga av ovanstående.

När du är klar. Släpp ut trycket som du har pumpat upp.

Ovanstående korta beskrivning kompletterar bruksanvisning